



# Überblick des Einstellungsmenüs

## OrCam MyEye 2 / MyReader 2.

Version 8.2, Februar 2019, Update.

**Hinweis:** Um das Hauptmenü zu verlassen oder zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Touch Bar zweimal in schneller Folge.

1. **Lesegeschwindigkeit** (Wörter pro Minute): zwischen 100 (sehr langsam) und 300 (sehr schnell) wählen, Standard ist 160.
2. **Lautstärke:** zwischen 1 (sehr leise) und 10 (sehr laut) wählen.
3. **Lese-Einstellungen:** enthält verschiedene Lesekonfigurationen;
  - 3.1. **Datumsformat:** Monat/Tag/Jahr oder Tag/Monat/Jahr
  - 3.2. **Automatische Seitenerkennung:** aktiviert oder deaktiviert (Standard)
  - 3.3. **Automatische Seitenerkennungs-Zeit:** zwischen 2-10 Sekunden wählen (Standard sind 3 Sekunden).
  - 3.4. **Lesenavigation:** aktiviert (Standard) oder deaktiviert
  - 3.5. **Pfeifton beim Pausieren im Lesevorgang zu aktivieren/deaktivieren:** legt die Pausenzeit im Lesezustand fest, bevor die Leseaktion gestoppt wird. Die Pausenzeit kann zwischen 30 Sekunden und 5 Minuten eingestellt werden.
  - 3.6. **Pausendauer der Lesenavigation einstellen:** legt die Pausenzeit im Lesezustand fest, bevor die Leseaktion gestoppt wird.
4. **Spracheinstellungen:** enthält verschiedene Sprachkonfigurationen;
  - 4.1. **Systemsprache:** zwischen den verfügbaren Systemsprachen wählen.
  - 4.2. **Lesesprache** zwischen den verfügbaren Lesesprachen wählen
5. **Gesteneinstellungen:** enthält verschiedene Gestenkonfigurationen;
  - 5.1. **Stopp-Geste:** aktiviert (Standard) oder deaktiviert
  - 5.2. **Uhr-Geste\*:** aktiviert (Standard) oder deaktiviert.
  - 5.3. **Gestenempfindlichkeit:** Hoch, Mittel, Niedrig;
6. **Gesichtseinstellungen\*:** enthält verschiedene Gesichtskonfigurationen;
  - 6.1. **Gesichtserkennungseinstellungen:** manuell, automatisch, oder voll-automatisch, und die gesamte Aktivierung oder Deaktivierung
  - 6.2. **Gesichtswiederholungszeit:** Einstellen, wie häufig das Gerät ein Gesicht ansagt, wenn es im Blickfeld ist. Zwischen 5 Sekunden und 10 Minuten (Standard sind 30 Sekunden).
  - 6.3. **Durchsicht gespeicherter Gesichter:** Möglichkeit gespeicherte Gesichter zu löschen oder Namen erneut aufzusprechen. Zudem kann man zusätzliche Fotos einer Person aufnehmen und hinzufügen.



- 6.4. **Löschen aller Gesichter:** Möglichkeit alle erlernten Gesichter zu löschen.
- 6.5. **Gesichtserkennungsempfindlichkeit:** wählen zwischen niedrig, mittel und hoch.
- 6.6. **Anweisungen zum Erlernen von Gesichtern**

## 7. **Erkennung von Produkten, Barcodes, Banknoten und Farben\*:**

- 7.1. **Durchsicht gespeicherter Produkte:** Möglichkeit gespeicherte Produkte zu löschen oder den Namen erneut aufzusprechen.
- 7.2. **Löschen aller erlernten Produkte:** Möglichkeit alle gespeicherten Produkte zu löschen.
- 7.3. **Aktivierung/Deaktivierung der Produkterkennung:** aktiviert oder deaktiviert (Standard)
- 7.4. **Durchsicht erlernter Barcodes:** Möglichkeit gespeicherte Barcodes zu löschen oder den Namen erneut aufzusprechen.
- 7.5. **Löschen aller erlernten Barcodes:** Möglichkeit alle erlernten Barcodes zu löschen.
- 7.6. **Barcode-Erkennung:** Wählen zwischen Manuell mit Gestensteuerung, automatisch (Standard) oder vollständiger Deaktivierung.
- 7.7. **Banknoten-Erkennung:** Wählen zwischen Manuell mit Gestensteuerung, automatisch (Standard) oder vollständiger Deaktivierung.
- 7.8. **Banknotenzählung:** aktiviert oder deaktiviert. Standardmäßig ist die Einstellung aktiviert und alle Banknoten im jeweiligen Sprachenpaket werden erkannt.
- 7.9. **Farberkennung:** aktiviert (Standard) oder deaktiviert.

## 8. **Verbindungseinstellungen:** enthält Bluetooth- und Wifi-Einstellungen;

- 8.1. **Bluetooth:** Verbindung zu einem Lautsprecher oder Kopfhörern als gewünschten Audioausgang.
- 8.2. **Wi-Fi:** verbinden mit WiFi für Software-Updates

## 9. **Allgemeine Einstellungen:** enthält erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten;

- 9.1. **Stimme:** wähle zwischen einer männlichen und weiblichen Stimme.
- 9.2. **Uhrzeit:** stelle die Uhrzeit und Zeitzone ein.
- 9.3. **Tutorial-Modus:** Zugang zum Tutorial-Modus.
- 9.4. **Automatische Pausendauer:** wähle zwischen 1 min und 30 min.
- 9.5. **Rückmeldungstöne:** Rückmeldungstöne auswählen.
- 9.6. **Zurücksetzen aller Einstellungen:** zu Werkseinstellungen zurücksetzen.
- 9.7. **Lichtkompatibilität der Kamera:** wähle zwischen 50 Hz (Europa) und 60 Hz (USA)
- 9.8. **Touch Bar Empfindlichkeit:** Möglichkeit die Empfindlichkeit des Berührungsfeldes zu verändern (niedrig, mittel, hoch).
- 9.9. **Lichtverhältnis-Meldung:** aktiviert (Standard) oder deaktiviert.
- 9.10. **Automatischer Blitz:** aktiviert (Standard) oder deaktiviert.
- 9.11. **Sprachbefehle (nur mit englischer Systemsprache):** aktiviert (Standard) oder deaktiviert.
- 9.12. **Kontaktdaten OrCam:** Abrufen der OrCam Kontaktdaten.



9.13. **Serial Nummer:** Abrufen der internen Seriennummer.

9.14. **Versionsinformationen:** Abrufen der aktuell installierten Software-Version.

10. **Zurück zu den Haupteinstellungen:** Aktivierungstaste drücken, um zum Haupteinstellungsmenü zurückzukehren.

\* gekennzeichnete Punkte sind nicht auf der MyReader verfügbar.