


# Kurzanleitung MANO 16

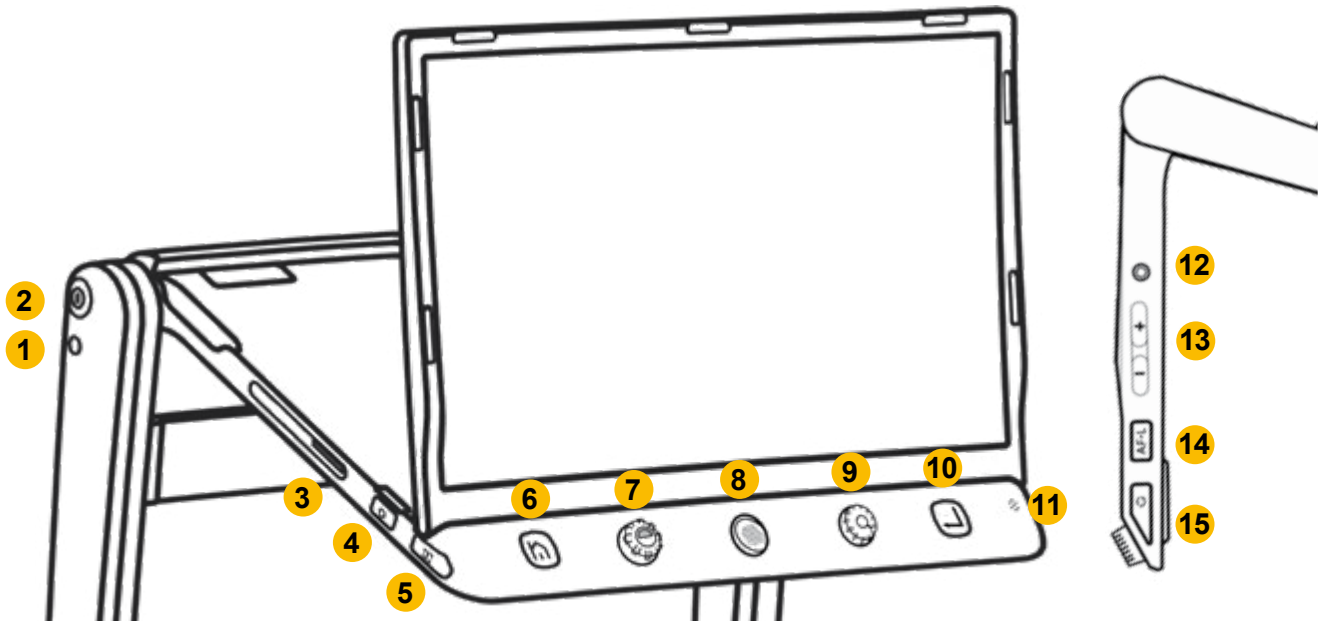

- 1) Ladebuchse
- 2) Ein/Aus
- 3) SD-Kartenslot
- 4) Galerie
- 5) Orientierungshilfen









- 6) Home/Hauptmenü
- 7) Farbmodus
- 8) Joystick
- 9) Vergrößerung
- 10) Auswahl bestätigen
- 11) Mikrofon

- 12) Kopfhörer-/Lautsprecherbuchse
- 13) Lautstärke +/-
- 14) Autofokus
- 15) Standbild

- A** Bodenplatte mit einer Hand festhalten und das Stativ ausklappen
- B** Display in eine angenehme Betrachtungsposition bringen
- C** optional an der Seite anheben und vertikal verstellen



# Kurzanleitung MANO 16

Bedienung im Vergrößerungsmodus und Menüs		
	Taste kurz drücken: Ladestand der Batterie ansehen	Taste lang drücken: Ein-/Ausschalten/Standby
	Taste kurz drücken: Menüleiste ein-/ausblenden	Taste lang drücken: Menü öffnen
	Regler drehen: Wechsel zwischen den verschiedenen Farbkombinationen	Regler drücken: Wechsel zwischen Echtfarben und letzter Fehlfarbe
	horizontale und vertikale Navigation im vergrößerten Bild, Navigation in der Bildergalerie, Größe und Position von Zeilenlineal/-abdeckung einstellen	
	Regler drehen: Vergrößerung ändern	Regler drücken: Ausschnittsuche im unvergrößerten Bild
	vergrößern: Finger auf dem Display voneinander weg bewegen	verkleinern: Finger zusammenziehen
	vergrößertes Bild mit dem Finger hin und her bewegen	
	kurz drücken: Wechsel der Kameraansicht und Bildschirmteilung	
	Taste kurz drücken: Wechsel zwischen Zeilenlineal/-abdeckung	
	Taste kurz drücken: Standbild anzeigen	Standbild speichern
	Taste kurz drücken: Auswahl bestätigen	Taste lang drücken: Mehrfachauswahl
	in Menüs und Galerien: mit dem Finger auf ein Symbol tippen um es auszuwählen	