


Kurzanleitung MANO PRO

MANO PRO aufstellen


Das Gerät sollte zusätzlich mit der Saugnapf-Halterung am Tisch befestigt werden, um ein versehentliches Umkippen zu vermeiden.





Saugnapf-Halterung von der Seite in den Arm des MANO PRO schieben

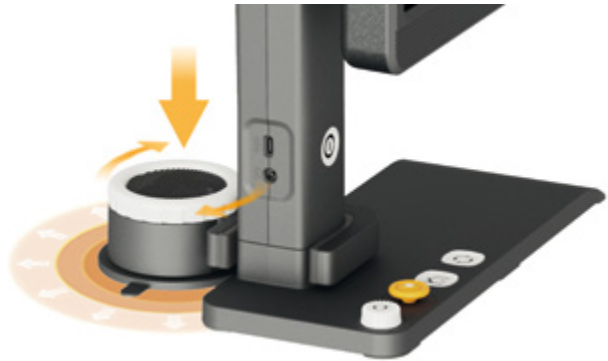


Saugnapf nach unten drücken und den grauen Ring im Uhrzeigersinn drehen, bis es knackt

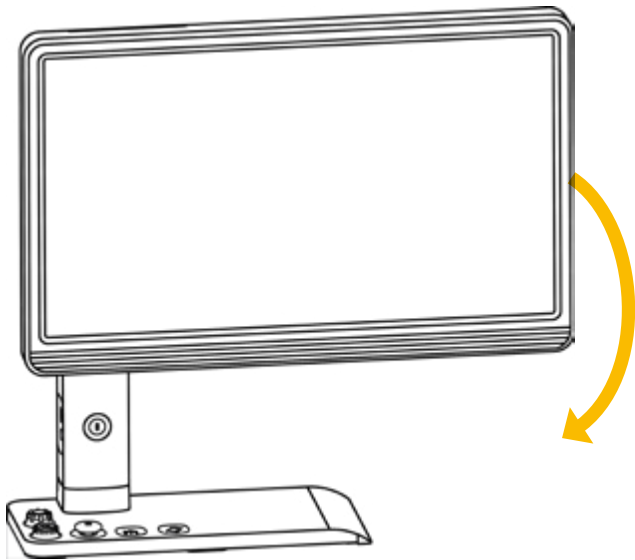


Display im Uhrzeigersinn drehen um zur vertikalen Bildschirmansicht zu wechseln

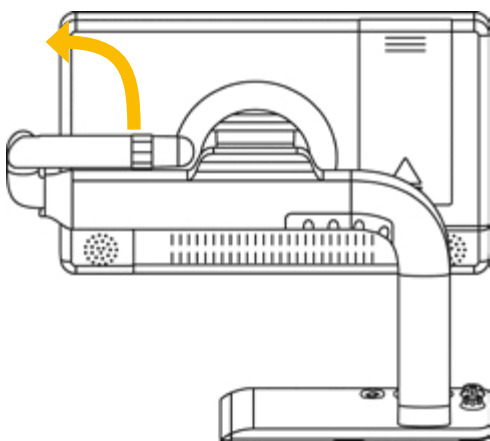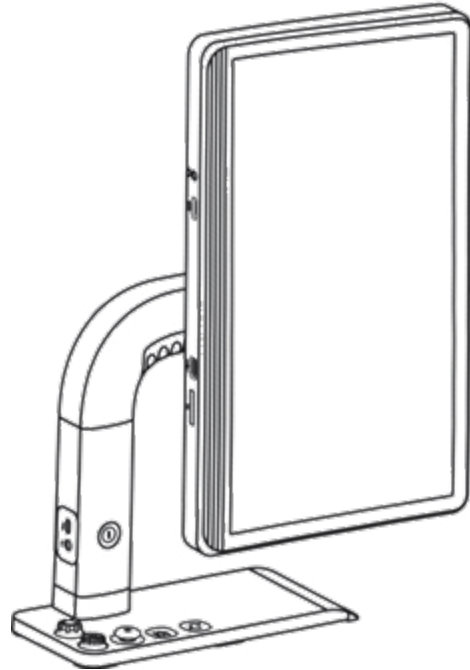

Kameraarm hochklappen und am grauen Ring die Kameraposition einstellen

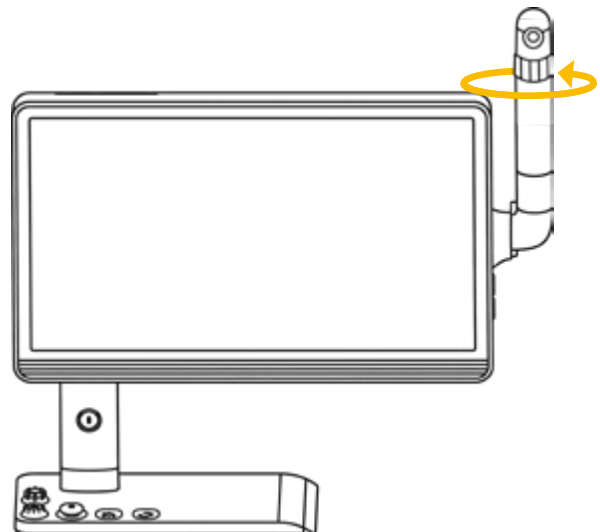


Beschreibung der Bedienelemente

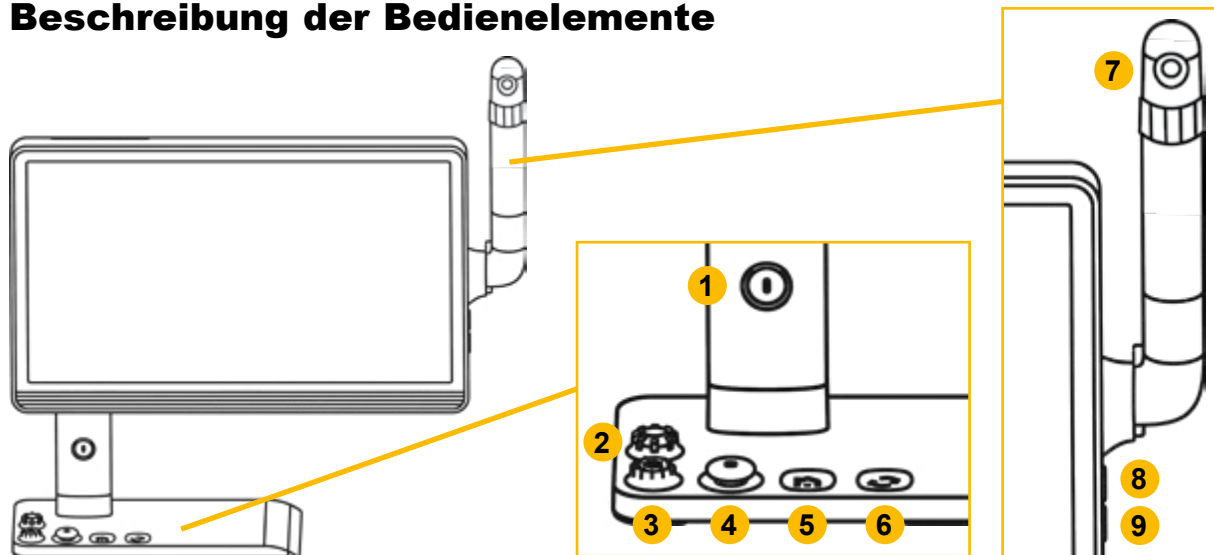

- 1) Ein/Aus
- 2) Standbild/Farbmodus
(breite Rillen fühlbar)
- 3) Vergrößerung
(schmale Rillen fühlbar)

- 4) Joystick
- 5) Home/Hauptmenü
- 6) Kamerawechsel/
Umschalten

- 7) Raumkamera
- 8) Lautstärke +
- 9) Lautstärke -

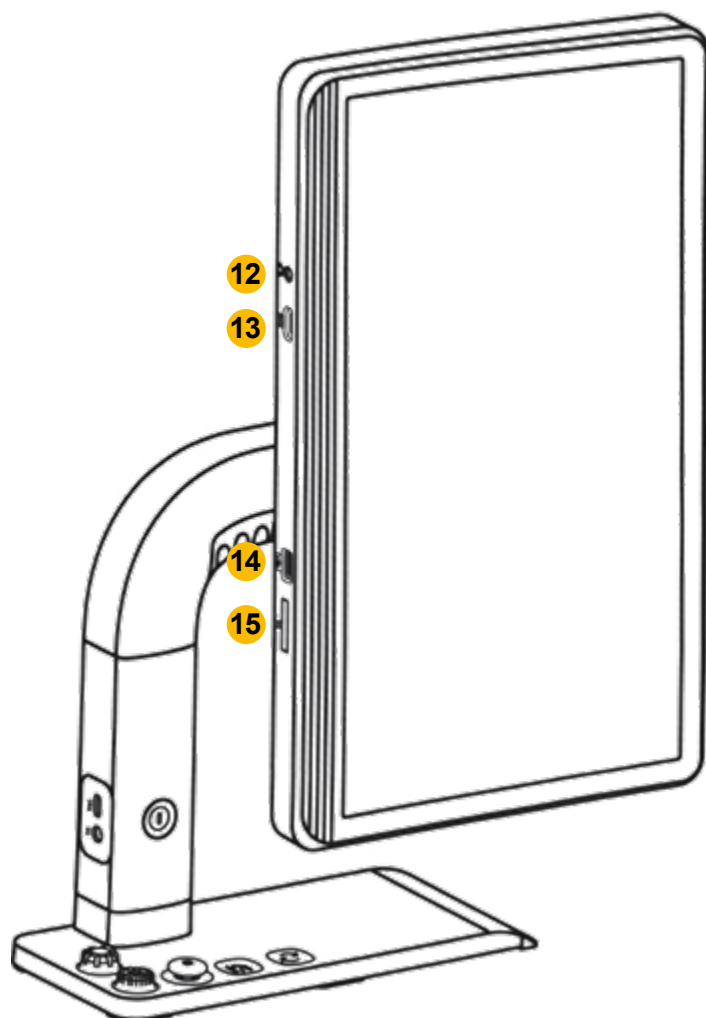

- 10) USB-C-Anschluss
(Smartphone-Spiegelung)
- 11) Ladebuchse
- 12) Kopfhörer-/Lautsprecherbuchse
- 13) HDMI-Eingang
- 14) USB-Anschluss
- 15) SD-Kartenslot

Bedienung

Bedienung im Vergrößerungsmodus und Menüs			
	Taste kurz drücken: Vorlesen starten		Taste lang drücken: Ein-/Ausschalten
	Taste kurz drücken: Menüleiste ein-/ausblenden		Taste lang drücken: Menü öffnen
	Regler drehen: Wechsel zwischen den verschiedenen Farbkombinationen		Regler drücken: Standbild anzeigen Regler lang drücken: Standbild speichern
	horizontale und vertikale Navigation im vergrößerten Bild, Navigation in der Bildergalerie, Größe und Position von Zeilenlineal/-abdeckung einstellen		
	Regler drehen: Vergrößerung ändern		Regler drücken: Ausschnittsuche im unvergrößerten Bild
	vergrößern: Finger auf dem Display voneinander weg bewegen		verkleinern: Finger zusammenziehen
	vergrößertes Bild mit dem Finger hin und her bewegen		
	kurz drücken: Wechsel der Kameraansicht und Bildschirmteilung		in Menüs und Galerien: kurz drücken: Auswahl bestätigen lang drücken in Galerien: Mehrfachauswahl
	in Menüs und Galerien: mit dem Finger auf ein Symbol tippen, um es auszuwählen		
	Umschalt-Taste gedrückt halten und Joystick drücken: Wechsel zwischen Zeilenlineal/-abdeckung		
Bedienung im Vorlesemodus			
	kurz drücken: Menüleiste ein-/ausblenden lange drücken: Vorlesemodus verlassen		Regler drehen: Vergrößerung ändern Regler drücken: herauszoomen
	Wechsel zwischen Bild- und Textmodus		
	Vorlesen beginnen/pausieren		 zurück/vor segment-/satzweise
	Vorlesegeschwindigkeit einstellen		 im Bildmodus: Bild speichern im Textmodus: Text speichern

Spiegelung (Anzeige des Smartphones)

MANO PRO bietet die Möglichkeit, den Bildschirm Ihres Smartphones auf dem Display zu spiegeln. Hierfür muss Ihr Smartphone über einen USB-C- oder Lightning-Anschluss verfügen.

Spiegeln von iPhones

Schließen Sie ihr iPhone mit Hilfe des mitgelieferten Kabels an den USB-C-Anschluss von MANO PRO an, der sich an der linken Seite auf Höhe der Ein-Aus-Taste befindet. Der gespiegelte Bildschirm wird direkt angezeigt. Eine Bedienung des iPhones auf dem Touch-Display von MANO PRO ist nicht möglich.

Spiegeln und Bedienen von Android-Smartphones

Gespiegelte Android-Smartphones können Sie auch über das Touch-Display von MANO PRO bedienen. Hierfür ist die Installation der MirrorPlay-App notwendig.

MirrorPlay-App



Bitte installieren Sie die MirrorPlay-App aus dem Play Store, bevor Sie Ihr Smartphone mit MANO PRO verbinden.

Scannen Sie einfach den QR-Code, um direkt zur App zu gelangen oder nutzen Sie die Suchfunktion im Play Store.



Schließen Sie nach der Installation Ihr Smartphone mit Hilfe des mitgelieferten Kabels an den USB-C-Anschluss von MANO PRO an, der sich an der linken Seite auf Höhe der Ein-Aus-Taste befindet.

Wenn Sie die App nach der ersten Installation öffnen oder neu starten, befolgen Sie bitte die Anweisungen, um die erforderliche Berechtigung zur Aktivierung der Smartphone-Bildschirmspiegelung zu erteilen. Hierfür müssen Sie die Berechtigung zum Zugriff auf das Mikrofon erteilen. Dies ist zwingend notwendig zur Nutzung der App.

Nach der Autorisierung wird die Bildschirmspiegelung in der Regel automatisch aktiviert, sobald das USB-Typ-C-Kabel erneut angeschlossen wird. Sie können wählen, ob Sie eine bestimmte App teilen möchten oder den gesamten Bildschirm.

Bitte beachten Sie bei Problemen mit der Spiegelung die Hinweise unter „Fehlerbehebung bei der Smartphone-Spiegelung“ auf Seite <?> der Gebrauchsanweisung.

Bild-in-Bild-Anzeige



Wird die Spiegelung des Smartphones angezeigt, können Sie durch Drücken der Umschalt-Taste das Bild der Raumkamera in einem kleinen Fenster anzeigen lassen.

Das Bild überlagert das Bild der Smartphone-Anzeige.

Sie können das Raumkamera-Bild auch anpassen. Tippen Sie hierfür auf das Raumkamerabild, das nun eine gelbe Markierung hat. Sie können jetzt wie gewohnt Vergrößerung und Farbmodus über die Tasten am Gerät einstellen. Möchten Sie die Einstellungen des Smartphones ändern, tippen Sie auf den Smartphone-Bildschirm. Das Raumkamerabild hat jetzt einen grauen Rahmen.

Sie können die Position des Bildes ändern, indem Sie es mit dem Finger verschieben. An den Ecken können Sie das Bild größer und kleiner ziehen.