


# Kurzanleitung MANO 16







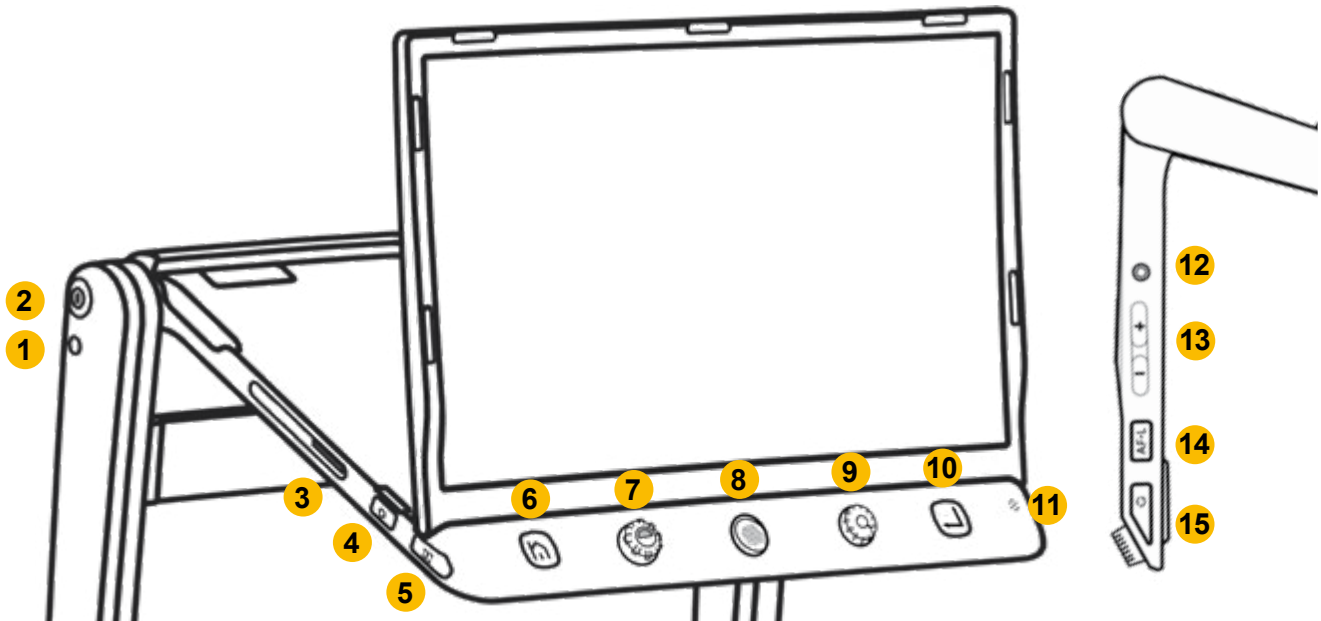





- |  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| 1) Ladebuchse                                    | 6) Home/Hauptmenü                        | 10) Auswahl bestätigen            |
| 2) Ein/Aus                                       | 7) Farbmodus                             | 11) Mikrofon                      |
| 3) SD-Kartenslot                                 | 8) Joystick (raue Oberfläche fühlbar)    | 12) Kopfhörer-/Lautsprecherbuchse |
| 4) Galerie                                       | 9) Vergrößerung (schmale Rillen fühlbar) | 13) Lautstärke +/-                |
| 5) Orientierungshilfen (vertikale Linie fühlbar) |  | 14) Autofokus                     |
|  |  | 15) Standbild                     |

- A** Bodenplatte mit einer Hand festhalten und das Stativ ausklappen
- B** Display in eine angenehme Betrachtungsposition bringen
- C** optional an der Seite anheben und vertikal verstellen



# Kurzanleitung MANO 16

Bedienung im Vergrößerungsmodus und Menüs		
	Taste kurz drücken: Ladestand der Batterie ansehen	Taste lang drücken: Ein-/Ausschalten/Standby
	Taste kurz drücken: Menüleiste ein-/ausblenden	Taste lang drücken: Menü öffnen
	Regler drehen: Wechsel zwischen den verschiedenen Farbkombinationen	Regler drücken: Wechsel zwischen Echtfarben und letzter Fehlfarbe
	horizontale und vertikale Navigation im vergrößerten Bild, Navigation in der Bildergalerie, Größe und Position von Zeilenlineal/-abdeckung einstellen	
	Regler drehen: Vergrößerung ändern	Regler drücken: Ausschnittsuche im unvergrößerten Bild
	vergrößern: Finger auf dem Display voneinander weg bewegen	verkleinern: Finger zusammenziehen
	vergrößertes Bild mit dem Finger hin und her bewegen	
	kurz drücken: Wechsel der Kameraansicht und Bildschirmteilung	
	Taste kurz drücken: Wechsel zwischen Zeilenlineal/-abdeckung	
	Taste kurz drücken: Standbild anzeigen	Standbild speichern
	Taste kurz drücken: Auswahl bestätigen	Taste lang drücken: Mehrfachauswahl
	in Menüs und Galerien: mit dem Finger auf ein Symbol tippen um es auszuwählen	