

Kurzanleitung topolino tablet

Beschreibung des Gerätes und der Software



Anschlüsse und Tasten am Gerät

- A) Netzanschluss
- B) USB-3-Anschluss
zum Verbinden der Raumkamera
- C) USB-C-Anschluss
zum Laden der Beleuchtung
- D) Lautstärkeregler
- E) Ein-/Aus-Taste
- F) Kopfhörer-/Lautsprecherbuchse

Bedienelemente der Software

- 1) topolino-Software beenden/verlassen
- 2) Texterkennung und Vorlesen beginnen
- 3) Bildergalerie öffnen
- 4) Bild/Video speichern
- 5) Bild aufnehmen
- 6) Videoaufnahme starten
- 7) Videoaufnahme beenden
- 8) Vergrößerung erhöhen
- 9) Vergrößerung verringern
- 10) Farbumschaltung
- 11) Raummodus
(bei angeschlossener Raumkamera)
- 12) Dokumentenmodus (im Raummodus)
- 13) Bildschirmteilung (im Raummodus)
- 14) Einstellungen

Bedienelemente der Raumkamera

Minus- oder Plus-Taste
drücken: stufenlose
Einstellung der
Vergrößerung












Minus-/Plus-Tasten gleichzeitig drücken:
Autofokus Ein/Aus











Kurzanleitung topolino tablet

Bedienung der Software






Funktionen im Vergrößerungsmodus

	Bild vergrößern		vergrößern: Finger auf dem Display voneinander wegbewegen
	Bild verkleinern		
			Tippen: Bild neu fokussieren
	Wechsel zwischen Echt- und Fehlfarben		Raummodus: vergrößertes Bild mit dem Finger hin und her bewegen
	Wechsel in den Raummodus		Bildschirmteilung aktivieren
	Wechsel in den Dokumentenmodus		



Bilder und Videos speichern und öffnen

	→		Bild aufnehmen
	→	 / 	Videoaufnahme starten / beenden
	→	 / 	Bildergalerie öffnen → alle Bilder des angegebenen Tages öffnen / löschen
	/		durch die Bilder navigieren

Funktionen im Vorlesemodus

	im Livebild: Texterkennung und Vorlesen starten				
	→	 / 	→		in Bildern der Galerie: Bild drehen → Spaltenerkennung ein / aus → Vorlesen beginnen

Bedienung in der Original-Darstellung:

	Tippen, um das Vorlesen zu stoppen bzw. zu starten
	erfasstes Dokument als txt-Datei speichern

Bedienung in der Fehlfarb-Darstellung:

					
Vorlesen beenden	satzweise zurück	Pause	Vorlesen fortsetzen	satzweise vor	als txt-Datei speichern