

# Gebrauchsanweisung

 **eyesmart**  
*by Synaptic*



Exklusiv-Vertrieb  
in Deutschland,  
Österreich,  
Schweiz durch  
Reinecker Vision

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Über diese Broschüre .....</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>2. Eine 360-Grad-Ansicht.....</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>3. Eine SIM-Karte einsetzen.....</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>4. SIM-Kartengrößen .....</b>                                     | <b>7</b>  |
| <b>5. Das Gerät aufladen .....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>6. Das Gerät ein- und ausschalten.....</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>7. Bedienung von Menüs und Touchscreen .....</b>                  | <b>12</b> |
| <b>8. WiFi konfigurieren.....</b>                                    | <b>14</b> |
| <b>9. Skype konfigurieren.....</b>                                   | <b>17</b> |
| <b>10. Individuell anpassen .....</b>                                | <b>18</b> |
| <b>11. Anrufe annehmen und beenden.....</b>                          | <b>19</b> |
| <b>12. Bedienung der Tastatur während eines Telefonats<br/>.....</b> | <b>22</b> |
| <b>13. Nutzung von Apps .....</b>                                    | <b>26</b> |
| <b>14. Zubehör .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>15. Software-Aktualisierung.....</b>                              | <b>27</b> |
| <b>16. eyesmart Hilfsfunktionen und Unterstützung .....</b>          | <b>28</b> |

# **1. Über diese Broschüre**

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Produktes der Firma Synapptic. Diese Broschüre beschreibt, wie Sie Ihr neues Smartphone oder Tablet einrichten und das erste Mal benutzen.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig und vor der ersten Nutzung des Gerätes.

## **2. Eine 360-Grad-Ansicht**

Bevor Sie Ihr neues eyesmart-Gerät einschalten, werfen wir zunächst einen Blick auf die verschiedenen Tasten, Schalter und Anschlusspunkte an den äußeren Kanten.

Halten Sie das Gerät so, dass der berührungsempfindliche Bildschirm auf Sie weist und die leicht angehoben positionierte rechteckige Taste sich in der Mitte unter dem Bildschirm befindet. In dieser Position sollten die längeren Kanten Ihres Gerätes auf der linken und der rechten Seite und die kürzeren Kanten oben und unten sein.

### **2.1 Power-Taste**

Wenn Sie Ihr eyesmart-Gerät im Hochformat halten, befindet sich die Power-Taste an der rechten Kante nahe der oberen rechten Ecke. Sie verwenden diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten oder um den Standby-Modus zu aktivieren.

### **2.2 Lautstärke-Tasten**

Die Lautstärke-Tasten befinden sich an der linken Kante Ihres Smartphones beziehungsweise an der rechten Kante Ihres Tablets. Diese Tasten beeinflussen die Lautstärke jedes Tons, den Ihr Gerät zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgibt. Die

Lautstärke-Tasten sind entweder zwei kleine Tasten nahe beieinander oder eine lange Taste. Wenn Sie Musik oder Filme abspielen, wird nur die Lautstärke des Unterhaltungsmediums betroffen sein. Wenn Sie telefonieren, wird die Lautstärke des Telefonats betroffen sein. Die obere Taste ist die Taste, mit der die Lautstärke erhöht wird. Die untere Taste ist die Taste, mit der die Lautstärke verringert wird. Drücken Sie auf die Enden der langen Taste oder auf die einzelnen Tasten.

### **2.3 Kopfhörerbuchse**

Je nach Gerät, befindet sich die Kopfhörerbuchse entweder an der oberen oder an der unteren Kante des Gerätes. Es ist ein kleines rundes Loch. Sie können einen kabelgebundenen Kopfhörer oder Ohrhörer in dieses Loch stecken. Wenn die Ohrhörer auch über ein eingebautes Mikrofon verfügen, werden Sie dieses Mikrofon verwenden können, um Ihre Stimme aufzuzeichnen oder am Telefon zu sprechen.

### **2.4 Ladegerätanschluss**

Der Ladegerätanschluss ist ein kleines Langloch entweder an der oberen oder an der unteren Kante des Gerätes. Das Kabel des Ladegerätes wird in dieses Langloch gesteckt. Es ist auch der USB-Anschluss, um das Gerät an einen USB-

Memorystickadapter oder an einen Computer anzuschließen.

## **2.5 Home-Taste**

Oben auf Ihrem Gerät, in der Mitte unter dem berührungsempfindlichen Bildschirm („Touchscreen“), ist die Home-Taste. Es ist die einzige etwas angehobene Taste auf der Oberseite des Gerätes. Sie wird in der Regel nicht verwendet, hat aber mehrere Funktionen, die je nach Ihren Zugänglichkeits-Einstellungen unterschiedlich sein können. Diese Taste kann verwendet werden, um einen Anruf anzunehmen oder den Android-Bildschirmleser „TalkBack“ ein- oder auszuschalten. Einzelheiten dazu finden Sie in Anhang A.

## **3. Eine SIM-Karte einsetzen**

Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist. Der SIM-Karten-Steckplatz befindet sich entweder unter der rückseitigen Abdeckung, oder es gibt einen kleinen SIM-Einschub am Rande des Gerätes.



Lösen Sie die rückseitige Abdeckung vorsichtig mit einem Fingernagel.

oder



führen Sie das mitgelieferte kleine Werkzeug (oder eine Büroklammer) in das kleine Loch seitlich am Gerät ein, um das SIM-Kartenfach zu öffnen.

Schieben Sie die SIM-Karte in den vorgesehenen Steckplatz und vergewissern Sie sich, dass die Karte richtig herum eingesetzt wird.

Anschließend bringen Sie die Abdeckung wieder an oder Sie drücken den SIM-Einschub wieder vollständig in das Gerät, so dass das SIM-Kartenfach vollständig geschlossen ist.

**Hinweis:** Ein Tablet mit eingesetzter SIM-Karte hat zusätzlich zu den üblichen Tablet-Funktionen auch Internetzugang über das Mobilfunknetz, kann Anrufe tätigen und empfangen und auch Textnachrichten senden und empfangen (wie ein Smartphone).

## 4. SIM-Kartengrößen

Es sind drei Kartengrößen verfügbar. Wenn Ihre SIM-Karte zu groß sein sollte, kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter. Er wird Ihnen eine kleinere Karte in der Regel kostenlos zur Verfügung stellen.

Sollte Ihre SIM-Karte zu klein sein, können Sie einen Adapter verwenden.

**Hinweis:** SIM-Karten mit PIN-Sicherheitsnummern werden von eyesmart nicht unterstützt.

## 5. Das Gerät aufladen

Halten Sie das Gerät so, dass der Bildschirm nach oben weist. Suchen Sie die kleine Erhöhung am kürzeren Ende des Ladekabels und achten Sie darauf, dass es ebenfalls nach oben weist.

Stecken Sie das kürzere Ende des Ladekabels in die USB-Ladebuchse des Gerätes; sie befindet sich an einer der kürzeren Seiten des Gerätes. Das andere Ende des Kabels wird in den mitgelieferten Netzadapter oder in einen Computer oder ein anderes Gerät mit geeigneter USB-Buchse gesteckt.



**Hinweis:** Einige Netzadapter müssen vor dem ersten Gebrauch zusammengebaut werden. Sie wurden auseinandergenommen, damit sie leichter in den Verpackungskarton passen.

Einige Adapter haben zwei abnehmbare Stecker.

Wir empfehlen, das Gerät über Nacht aufzuladen, damit es am nächsten Tag wieder voll einsatzbereit ist. (Bitte beachten: Weder Smartphone noch Tablet können durch eine Überladung beschädigt werden).

## **6. Das Gerät ein- und ausschalten**

Auf dem Smartphone und dem Tablet gibt es drei Energiezustände. Das Gerät ist eingeschaltet, ausgeschaltet oder im Standby-Modus. Obgleich im Standby-Modus auf dem Bildschirm nichts zu sehen ist, ist das Gerät „im Inneren“ aktiv und jederzeit bereit, Anrufe entgegenzunehmen und E-Mails zu empfangen.

Im Standby-Modus verbraucht das Gerät sehr wenig Energie und kann mit einer einzigen Aufladung durchaus eine ganze Woche auskommen. „Standby“ wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät einige Minuten lang nicht genutzt wurde.


## **6.1 Das Gerät einschalten**

Halten Sie die Netztaste am Geräterand 3 Sekunden lang gedrückt, um ein vollständig ausgeschaltetes Gerät wieder einzuschalten. Auf einem Smartphone ist dies die einzige fühlbare Taste am rechten Gehäuserand. Auf einem Tablet ist dies die kürzere der zwei fühlbaren Tasten am rechten Gehäuserand. In beiden Fällen ist die Taste zirka einen Zentimeter lang.

Nach zirka 30 Sekunden erscheint das eyesmart-Hauptmenü und die Sprachausgabe meldet sich.

Um das Gerät einzuschalten, wenn es im Standby-Modus ist, drücken Sie ganz kurz auf die Power-Taste. Im Nu erscheint das Hauptmenü.

Wenn der Tastensperre-Bildschirm vor dem Hauptmenü erscheint, streichen Sie mit Ihrem Finger an beliebiger Stelle von links nach rechts über die gesamte Breite des Bildschirms, um ihn zu entfernen. Beim Schließen dieses Bildschirms ertönt eine Glocke.

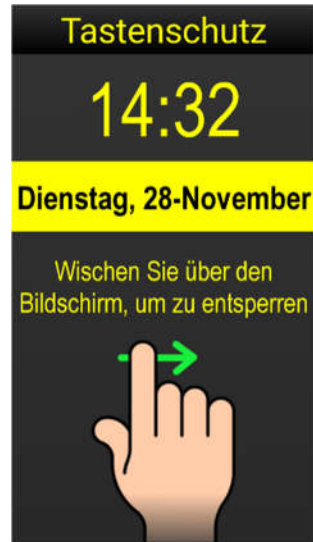

Der Tastensperre-Bildschirm soll verhindern, dass der berührungsempfindliche Bildschirm versehentlich in Ihrer Jacken- oder Hosentasche oder in einem Beutel aktiviert wird. Er kann so konfiguriert werden, dass eine Wischbewegung oder die Eingabe einer Sicherheits-PIN-Nummer erforderlich ist, oder dass das Gerät vollständig ausgeschaltet wird.

Tablets sind werkseitig so voreingestellt, dass der Sperr- Bildschirm ausgeschaltet werden muss. Bei Smartphones ist eine Wisch-Bewegung erforderlich.

Nutzen Sie die Option „Sperrbildschirm“ im Menü „eyesmart-Einstellungen“, um den Sperrbildschirm zu ändern.

## **6.2 Das Gerät ausschalten**

Drücken Sie kurz auf die Power-Taste am Gehäuserand des Gerätes, um den Bildschirm auszuschalten, und versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus.

Es ist üblich, das Gerät nicht vollständig auszuschalten, sondern im Standby-Modus zu belassen.


Um das Gerät vollständig auszuschalten, wählen Sie entweder unten im eyesmart-Hauptmenü die Option „Ausschalten“ (falls vorhanden), oder Sie drücken drei Sekunden lang auf die Power-Taste am Gehäuserand und wählen die Option „Ausschalten“ im Android-Ausschaltmenü.

Wenn Ihr Gerät keine Ausschalt-Option am Ende des eyesmart-Hauptmenüs anbietet, können Sie stattdessen die Option „Sprachrückmeldung“ im Android-Ausschaltmenü wählen. In Anhang A finden Sie weitere Informationen.

## 7. Bedienung von Menüs und Touchscreen

Alle eyesmart-Bildschirme haben eine einheitliche Präsentation und Bedienung. Wenn Sie einmal gelernt haben, wie man ein Menü benutzt, wird Ihnen die Benutzung aller anderen Menüs leicht fallen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Menüs mit ihren werkseitigen Voreinstellungen bedienen. Dazu gehören Sprachausgabe, gelber Text auf schwarzem Hintergrund und ein Vergrößerungsfaktor, der in jedem Bildschirm die Anzeige von 4 Menüpunkten ermöglicht.

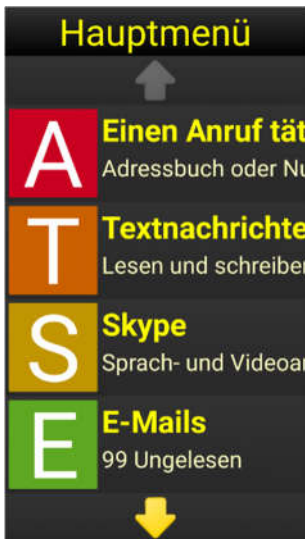


Das Hauptmenü ist sehr einfach strukturiert. Ganz oben ist der Titel des Menüs. Darunter ist eine Taste, um zu der vorherigen Seite zurückzukehren. Es folgt eine Reihe von Menüoptionen. Und unten im Bildschirm ist eine Taste, um zu der nächsten Seite zu gelangen.

Sie bedienen das Menü, indem Sie einen Finger ganz oben auf den Bildschirm platzieren und leicht auf den Bildschirm drücken.

Ziehen Sie den Finger auf dem Bildschirm nach unten zu der gewünschten Menüoption. Dann lösen Sie den Finger vom Bildschirm. In dem Moment erkennt das Gerät, dass Sie diese Option auswählen möchten. Wenn Sie keine Option auswählen möchten, bewegen Sie den Finger wieder nach oben und vom Bildschirm herunter.

Wenn Ihr Finger auf dem Weg zu der gewünschten Option andere Menüoptionen berührt, ertönt ein Piepstön und die jeweilige Menüoption wird sowohl visuell hervorgehoben als auch über die Sprachausgabe wiedergegeben.

Nach der Auswahl einer Option im Hauptmenü werden nachfolgende Bildschirme und Menüs ein etwas anderes Layout besitzen.

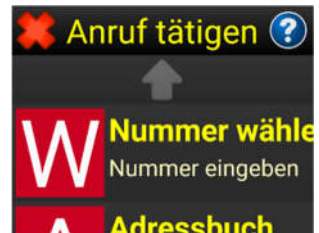

In jedem Bildschirm, der dem Hauptmenü folgt, erscheinen zusätzlich ein rotes Kreuz oben links und ein blau-weißes Fragezeichen oben rechts.

Tippen Sie das rote Kreuz oben links an, um den aktuellen Bildschirm oder das aktuelle Menü

abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm oder Menü zurückzukehren.

Tippen Sie das blau-weiße Fragezeichen oben rechts im Bildschirm an, um Hilfe speziell für den angezeigten Bildschirm einzusehen.

## **8. WiFi konfigurieren**

Für die Nutzung mehrerer eyesmart-Funktionen, einschließlich Weltweites TV, Internetbrowser, E-Mails, Mein Standort, RSS-Feeds und die Vorlese-Funktion ist eine Internetverbindung Voraussetzung.

Wir empfehlen, wenn möglich stets eine WiFi-Verbindung zu nutzen. Dies könnte Ihre WiFi-Verbindung zuhause oder eine WiFi-Verbindung in einem Café, Geschäft oder Hotel sein.

Um WiFi zu konfigurieren, wählen Sie im Hauptmenü die Option „Einstellungen“ und anschließend die WiFi-Option. Das WiFi-Menü bietet Optionen für das Ein- und Ausschalten von WiFi und für die Auswahl eines bestimmten WiFi-Zugangspunktes.

Sollte für die ausgewählte WiFi-Verbindung ein eyesmart-Passwort erforderlich sein, wird eyesmart Sie auffordern, das Passwort einzugeben. Dieses Passwort wird gespeichert und die WiFi-Verbindung wird automatisch wieder hergestellt, wenn sie das nächste Mal in Reichweite ist.

Sollten Sie nicht nach einem WiFi-Passwort gefragt werden, empfehlen wir, Ihre Startseite im Internetbrowser umgehend zu öffnen. Bei einigen WiFi-Verbindungen müssen Sie sich zuerst über deren Internetseite anmelden, bevor die WiFi-Verbindung vollständig aktiviert wird.

Um ein Passwort von einer bestimmten WiFi-Verbindung zu entfernen, wählen Sie die Verbindung in der WiFi-Liste aus und anschließend die Option „Vergessen“.

## **8.1 Mobiles Internet/Mobile Daten**

Wenn Smartphones (und Tablets mit freigeschalteten SIM-Karten) nicht per WiFi ans Internet angeschlossen sind, nutzen sie eventuell automatisch das mobile Internet, um zu aktualisieren, Kontakte zu synchronisieren oder neue E-Mails abzurufen usw.



Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem SIM-Karten-anbieter über Datengebühren, die eventuell anfallen, wenn eine mobile 3G, 4G oder andere Internet-Datenverbindung genutzt wird.

Außerdem empfehlen wir, den SIM-Karten-anbieter darum zu bitten, den Internet-Zugriff über Roaming bei Auslandsreisen abzuschalten, andernfalls könnten erhebliche Zusatzgebühren anfallen.

Um Probleme mit mobilen Datengebühren zu vermeiden, empfehlen wir Laufzeitverträge oder monatliche Pay-as-you-go-Angebote, bei denen Internetdaten neben Telefonaten und SMS-Nachrichten bis zu einem bestimmten Limit inbegriffen sind.

## **9. Skype konfigurieren**

Über Skype können andere Skype-Nutzer kostenlos über das Internet angerufen werden.

Bevor Sie Skype von eyesmart nutzen, muss es unter Android konfiguriert und einmal ausgeführt werden. Anschließend werden die Anmeldedetails gespeichert und automatisch von eyesmart genutzt.

Führen Sie die Skype-App vom eyesmart App-Startprogramm oder direkt von den Android-Bildschirmen aus. In Anhang A unten ist angegeben, ob auf den Android-Bildschirmen Sprachrückmeldung benötigt wird.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein neues Skype-Konto einzurichten, oder geben Sie die Details eines bestehenden Skype-Kontos ein. (Dies muss nur einmal erfolgen). Kehren Sie zu eyesmart zurück und nutzen Sie Skype von eyesmart wie üblich.

## 10. Individuell anpassen

Verwenden Sie die Option „Einstellungen“ im Hauptmenü, um das Erscheinungsbild und die Bedienung der eyesmart-Bildschirme zu ändern. Von hier aus können Sie Folgendes ändern:

- Farbschema (Farbe von Text und Hintergrund)
- Farbe und Kontrast der Symbole
- Bildschirm-Helligkeit
- Zoomfaktor und Textgröße
- Hauptmenü (hinzufügen, löschen und neu sortieren)
- Hauptmenü als einzelne Seite, Raster oder Mehrfachseiten-Liste
- Lautstärke der Sprachausgabe
- Sprechgeschwindigkeit
- Klingel- und Benachrichtigungstöne
- Tastentöne, Piepstöne, Vibration und andere Hinweissignale

Wir empfehlen, verschiedene Zoomfaktoren auszuprobieren, da sich die Darstellung der Menüs je nach Zoomfaktor etwas verändert. Dies ermöglicht eine neue Anordnung von Textabschnitten, außerdem werden sie größer als normal dargestellt.

## **11. Anrufe annehmen und beenden**

Smartphones und Tablets mit freigeschalteter SIM-Karte, die von Synapptic bereitgestellt werden, bieten vier verschiedene Optionen, um Anrufe anzunehmen und zu beenden:

### **11.1 Mechanische Tasten**

Alle Synapptic Smartphones und Tablets (mit freigeschalteter SIM-Karte) sind konfiguriert und bieten nützliche Tastaturkürzel, die es ermöglichen, über mechanische Tasten Anrufe anzunehmen oder abzulehnen.

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| Android Home-Taste | = | Anruf annehmen |
| Power-Taste        | = | Anruf beenden  |

Ganz gleich, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird, wenn das Gerät klingelt, die mechanischen Tasten für das Annehmen oder Ablehnen des Anrufs werden stets funktionieren.

### **11.2 Android-Anrufbildschirm**

Wir empfehlen, eyesmart so einzustellen, dass der Android-Anrufbildschirm genutzt wird, um Anrufe anzunehmen oder abzulehnen.


Verwenden Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ im

Hauptmenü, um bei der Option „Bildschirm für eingehende Anrufe“ Android festzulegen.

Wenn das Telefon klingelt, erscheinen am unteren Bildschirmrand ein grünes und ein rotes Bildsymbol. Das grüne Symbol ist links, das rote rechts. Wischen Sie im unteren Teil des Bildschirms von links nach rechts, um einen Anruf anzunehmen. Wischen Sie im unteren Teil des Bildschirms von rechts nach links, um einen Anruf abzulehnen.




Während eines laufenden Anrufs drücken Sie das rote Symbol in der Mitte des Bildschirms unten, um den Anruf zu beenden.

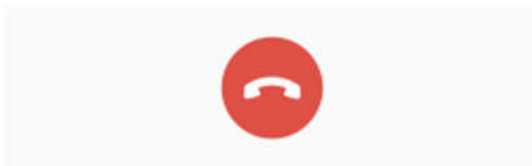

Sie können aber auch die mechanischen Tasten verwenden, um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen: die Home-Taste, um den Anruf anzunehmen und die Power-Taste, um ihn zu beenden.

## 11.3 eyesmart-Anrufbildschirm

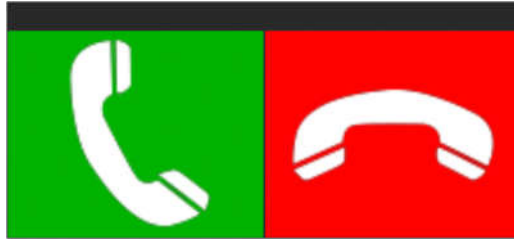

Der eyesmart-Anrufbildschirm bietet einen vereinfachten Anrufbildschirm, der ausschließlich die Tasten für die Annahme und die Beendigung von Anrufen anzeigt. Verwenden Sie die Option „Einstellungen“ im Hauptmenü, um die Option „Bildschirm für eingehende Anrufe“ zu ändern.

Wenn das Telefon klingelt, erscheinen am unteren Bildschirmrand ein grünes und ein rotes Bildsymbol. Das grüne Symbol ist links, das rote rechts. Drücken Sie die Taste unten links im Bildschirm, um einen Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste unten rechts im Bildschirm, um einen Anruf abzulehnen.

Während eines laufenden Anrufs wird nur die rote Taste unten im Bildschirm angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um den Anruf zu beenden.

Sie können aber auch die mechanischen Tasten verwenden, um einen Anruf anzunehmen oder zu

beenden. (Die Home-Taste, um den Anruf anzunehmen und die Power-Taste, um ihn zu beenden).

## **11.4 Sprachbefehle**

Die Mehrzahl der Synaptic-Geräte ist in der Lage, Anrufe anzunehmen oder abzulehnen, indem die Sprachbefehle „Annehmen“ oder „Ablehnen“ gegeben werden.

Diese Funktion ist jedoch nicht standardmäßig aktiviert. Verwenden Sie die Zugänglichkeitsoption im Android-Bildschirm „Einstellungen“, um diese Option einzuschalten.


## **12. Bedienung der Tastatur während eines Telefonats**

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf Smartphones / Tablets.

### **12.1 Wenn Android als Bildschirm für eingehende Anrufe festgelegt ist...**

Die Bedienung der Tastatur ist am einfachsten, wenn eyesmart so eingestellt ist, dass der Android-Anrufbildschirm genutzt wird.

Während eines laufenden Telefonats wird unten im Bildschirm eine einzelne rote Taste angezeigt, die dazu dient, das Telefonat zu beenden. Direkt über dieser Taste ist die Tastatur-Taste. Drücken Sie diese Taste, damit die Tastatur während eines Telefonats angezeigt wird, so dass Sie Telefonie-Menüs mit Aufforderungen wie zum Beispiel "Drücken Sie 1 für x" oder "Drücken Sie 2 für y" bedienen können.

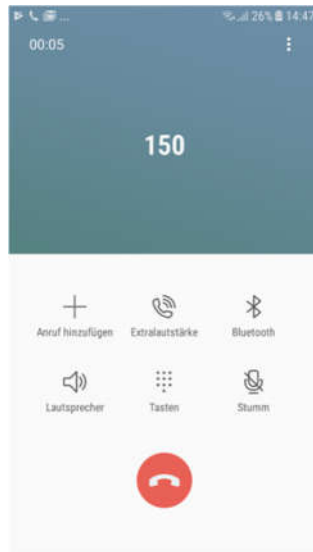



Wenn Sie die Tastatur-Taste gedrückt haben, wird die Tastatur angezeigt.



Verwenden Sie Tastatur, um die entsprechenden Zahlen während eines Telefonats einzugeben. Wenn Sprachrückmeldung benötigt wird, um entweder zunächst die Tastaturtaste zu finden oder um bestimmte Zahlen auf der Tastatur zu finden, drücken Sie dreimal kurz nacheinander auf die Android Home-Taste. Dadurch wird TalkBack, der Bildschirmleser für Android-Bildschirme eingeschaltet.

**Hinweis:** Wenn Sie TalkBack nicht länger benötigen, sollten Sie diese Funktion ausschalten. Dazu drücken Sie erneut dreimal auf die Android Home-Taste. Bleibt TalkBack eingeschaltet,

ändert sich die Art und Weise, in der eyesmart funktioniert. Das Programm wird gezwungen, im Doppeltipp-Modus zu arbeiten. (Weitere Informationen über die Nutzung von TalkBack finden Sie in Anhang A weiter unten).

## **12.2 Wenn eyesmart als Anruf-Bildschirm festgelegt ist**

In diesem Fall wird während eines laufenden Telefonats der vereinfachte eyesmart-Bildschirm angezeigt. Aufgrund der Android-Sicherheits-einstellungen kann auf diesem Bildschirm keine Tastatur verfügbar sein.

Um Zugang zu der Tastatur zu erhalten, müssen Sie die Android Home-Taste kurz vor dem Telefonat dreimal drücken. (Also kurz bevor Sie die grüne Taste drücken, wenn Sie die Rufnummer mittels Ziffernblock wählen, oder kurz bevor Sie eine Person im Adressbuch auswählen). Wenn Sie die Android Home-Taste dreimal drücken, startet TalkBack. Dies wird von eyesmart erfasst und das Programm zeigt automatisch den Android-Anrufbildschirm statt des vereinfachten eyesmart-Bildschirms.

Nun können Sie die Tastatur-Taste suchen und die Tastatur während des Telefonats bedienen. (Weitere Details finden Sie in Abschnitt 12.1 oben).

**Hinweis:** Am Ende des Telefonats ist TalkBack wieder auszuschalten. Dazu drücken Sie dreimal auf die Android Home-Taste. Bleibt TalkBack eingeschaltet, ändert sich die Art und Weise, in der eyesmart funktioniert. Das Programm wird gezwungen, im Doppeltipp-Modus zu arbeiten.

### **13. Nutzung von Apps**

Die Option „App-Startprogramm“ im eyesmart-Menü „Werkzeugkasten“ lässt den Start von anderen Apps (die bereits auf dem Gerät installiert sind), zu. Informationen dazu, wie TalkBack, der Bildschirmleser für Android gestartet wird, um bei der Verwendung von gestarteten Apps Sprachrückmeldung zu geben, finden Sie in Anhang A.

Bitte bedenken Sie, dass die Nutzung von gestarteten Apps mit TalkBack komplizierter ist als deren Nutzung unter eyesmart.

## 14. Zubehör

**Schutzhülle/-tasche.** Mit der beigefügten Schutzhülle oder Schutztasche schützen Sie Ihr Gerät vor unansehnlichen Kratzern und verhindern Dellen auf dem Gerät.

## 15. Software-Aktualisierung

Mit dem Kauf der eyesmart-Software erhalten Sie zwei Jahre lang kostenlose Aktualisierungen. Nach dem Ablauf der zwei Jahre können Aktualisierungen für weitere Jahre gekauft werden.

Um eyesmart zu aktualisieren und die jeweils neuesten Funktionen zu erhalten, wählen Sie im Hauptmenü die Optionen Tablet-Einstellungen oder Smartphone-Einstellungen und anschließend die Optionen „Aktualisierungen“.

Wir empfehlen, eyesmart mindestens einmal alle sechs Monate zu aktualisieren.

**Hinweis:** Eventuell ist die Hilfe einer sehenden Person erforderlich, um die Aktualisierung zu vervollständigen, weil ein Android-Sicherheitsbildschirm angezeigt werden wird, der bestätigt, dass die Software auf Ihrem Gerät aktualisiert

werden soll. Um auf diesem Android-Sicherheitsbildschirm Sprachrückmeldung zu erhalten, kann TalkBack (Bildschirmleser für Android) vorübergehend eingeschaltet werden.

Weitere Informationen finden Sie in Anhang A.

## **16. eyesmart Hilfsfunktionen und Unterstützung**

Es gibt drei Methoden, um Hilfe und Unterstützung von eyesmart zu erhalten.

**1. Hilfeoption im Hauptmenü.** Die Hilfeoption im Hauptmenü enthält grundlegende Informationen über die Bedienung des eyesmart-Systems. Außerdem ist eine Sucheinrichtung verfügbar.

**2. Hilfe für aktuelle Bildschirmanzeige.** In jedem Bildschirm erscheint ein blau-weißes Fragezeichen oben rechts in der Ecke. Wählen Sie das Fragezeichen, um Hilfedokumente und Videotrainingmaterial für die aktuelle Bildschirmanzeige einzusehen.

**Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte unser technisches Support-Team:**

**E-Mail: [info@reineckervision.de](mailto:info@reineckervision.de)**

**Tel: 06257 93110**

## **Anhang A**

### **Sprachrückmeldung für Android-Bildschirme aktivieren**

Wenn für einen Android-Bildschirm Sprachrückmeldung benötigt wird, betätigen Sie die Android Home-Taste (die leicht angehobene Taste unten am Bildschirm) dreimal kurz nacheinander. Dadurch wird TalkBack (der Bildschirmleser für Android) eingeschaltet.

Wenn es auf Ihrem Gerät keine Home-Taste gibt, gibt es eventuell eine alternative Tastenkombination, wie zum Beispiel gleichzeitiges Drücken auf die Taste „Lautstärke erhöhen“ und auf die Power-Taste.

Wischen Sie auf dem Bildschirm von links nach rechts oder von rechts nach links, um den nächsten oder den vorherigen inhaltlichen Punkt hervorzuheben. Alternativ ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, damit Punkte auf dem Bildschirm laut vorgelesen werden. Doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um einen Punkt auszuwählen.

Bitte vergessen Sie nicht, TalkBack auszuschalten, wenn Sie fertig sind (Android Home-

Taste erneut dreimal drücken). Eine gleichzeitige Verwendung von TalkBack und eyesmart führt dazu, dass eyesmart nicht wie gewohnt bedient werden kann. Talkback wird eyesmart dazu zwingen, für die Auswahl von Menüoptionen ein doppeltes Antippen zu verwenden.



Reinecker Vision GmbH  
Zentrale Deutschland und Export

**Vertrieb, Kundenberatung:**

Sandwiesenstraße 19  
64665 Alsbach-Hähnlein

**Kundendienst:**

Erlenweg 3

64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: 06257 931 1-0

Fax: 06257 9311-8008

E-Mail: [info@reineckervision.de](mailto:info@reineckervision.de)

[www.reineckervision.de](http://www.reineckervision.de)

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder einem Servicefall direkt an unser Hauptwerk in Alsbach-Hähnlein oder an eine unserer Niederlassungen.

Bei im Ausland erworbenen Produkten kontaktieren Sie im Servicefall bitte Ihren dort ansässigen Händler.

Reinecker Vision GmbH

International Contact

**sales department, customer relations:**

Sandwiesenstraße 19  
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

**customer service:**

Erlenweg 3

DE-64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: +49 6257 9311-0

Fax: +49 6257 9311-8230

E-Mail: [international@reineckervision.de](mailto:international@reineckervision.de)

[www.reineckervision.com](http://www.reineckervision.com)

In case service is necessary, please contact your authorized distributor.