

# VEO VOX

Grenzenlos lesen: keine Limitierung auf nur eine Seite



# Wir sind für Sie da!

Seit 1971 entwickelt Reinecker Lese- und Vorlesesysteme, mit denen Sie auch bei verminderter Sehkraft selbstständig Texte lesen und Bilder betrachten können – von Familienfotos, über Zeitungen, bis zu SMS und geschäftlichen E-Mails.

Unser Anspruch ist es, Ihnen die Freude am Lesen zurückzugeben. Deshalb ist die Beratung das Herzstück unserer Versorgung. Sie entscheiden, wo diese stattfindet: Bei Ihnen zu Hause, in einem unserer Fachgeschäfte, an Ihrem Arbeitsplatz oder in einer Low Vision-Fachberatung beim Augenarzt oder Augenoptiker.

Nach Ihrer Entscheidung für eine Hilfsmittelkombination übernehmen wir, im Falle einer (Teil-) Finanzierung, die Abwicklung mit den Kostenträgern (z.B. Krankenkassen).

**Reinecker Vision**

# Alles aus einer Hand

Wenn sich Ihre Sehkraft im Alter oder in Folge einer Augenkrankheit stark verschlechtert hat, kann ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Hilfsmittelsortiment Ihren Alltag erheblich erleichtern.

## Unser Vollsortiment:

- ▶ Elektronische Lupen: MANO
- ▶ Bildschirmlesesysteme: mezzo, VEO, Videomatic
- ▶ Kamerasysteme: topolino
- ▶ Vorlesesysteme: VOX, OrCam
- ▶ Blindenhilfsmittel: Braillesysteme, DAISY-Player, Software
- ▶ Elektronische Brillen- und Assistenzsysteme: OrCam, eSight, eyesmart
- ▶ Optische Lupen & Lupenbrillen, Low Vision-Leuchten, Alltagshilfen

## Produktportfolio

e gehen – aber die  
m goldenen Licht zeigen  
lüten und fackeln (nicht  
Blütenfeuerwerk ab.  
stblüher!




# VEO VOX

Das Lese-Vorlesesystem VEOVOX bietet Ihnen höchsten Lese- und Vorlesekomfort. VEOVOX überzeugt durch innovative Technik, nutzerfreundliche Bedienung und Qualität made in Germany. Basierend auf dem Bildschirmlesesystem VEO mit der übersichtlichen 3-Knopf-Bedienung und der hochauflösenden Autofokus-Kamera besitzt VEO VOX zusätzlich alle Eigenschaften eines Vorlesesystems.

Nutzen Sie VEO VOX als **Bildschirmlesesystem**, um in Ihrer gewünschten Vergrößerung zu lesen. Der Autofokus der FullHD-Kamera und die energiesparende LED-Beleuchtung sorgen für ein kontrastreiches, flimmerfreies Bild.

Benötigen Ihre Augen eine Pause oder möchten Sie nebenher etwas anderes erledigen, können Sie sich einen beliebigen Text (z.B. Brief oder Zeitung) **vorlesen lassen**. Drücken Sie einfach mit Ihrem Finger auf das Wort, ab dem vorgelesen werden soll und VEO VOX liest Ihnen mit einer natürlichen Stimme ab hier vor.

**Komfortabel lesen und vorlesen mit Lese-Vorlesesystemen**

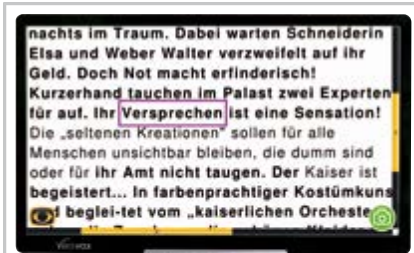

Spalte



Horizontal





Wort



Vertikal

# VEO VOX

Die FullHD-Kamera mit optischem Zoom vergrößert das Bild bis zu 100fach auf dem Touchscreen der 24"-Klasse. Dabei sorgt die -Technologie für hochqualitative Bilder bei minimiertem Bildrauschen. Die -Technologie reduziert die Reflexion stark glänzender Oberflächen und den Schattenwurf der Hand beim Schreiben.

Die hochwertige Text-zu-Sprache- bzw. Vorlesefunktion besticht mit natürlichen Stimmen sowie individuell regulierbarer Lesegeschwindigkeit und Lautstärke.

Möchten Sie mehr als nur das auf dem Bildschirm Angezeigte vorgelesen bekommen, dann nutzen Sie den innovativen **Live-Lese-Modus**. Mit dieser Funktion können Sie während des Vorlesens das Lesegut weiterbewegen und umblättern, ohne dass die Sprachausgabe unterbrochen wird. Anders als bei vergleichbaren Systemen sind Sie nicht auf eine Din A4-Seite begrenzt.

Im **Standbild-Lese-Modus** wird nur das auf dem Bildschirm Angezeigte vorgelesen. Hier können Sie den vorgelesenen Text in unterschiedlichen Darstellungsformen auf dem Bildschirm anzeigen lassen (z.B. Wort-für-Wort- oder Zeilendarstellung).

**Live-Lese-Modus: keine Limitierung auf nur eine Seite**



# DIE KÖNIGIN DER FARBEN

Nach Jutta Bauer

## Theater Mär

Farbenrausch im Kindertheater - mitreißend, poetisch und grenzenlos fantasievoll.

Was passiert, wenn Traum und Wirklichkeit verschmelzen? Wenn die leuchtendsten Farben sich befehlen lassen: das sanfte und milde Blau, das wilde und unbeherrschte Rot und das warme und helle Gelb, das auch mal zickig und gemein sein kann? Und wenn sie dann nach und nach auch noch alle mitreißen: die Königin Malwida, den Erzähler und das Publikum... Voller Poesie,



© Jürgen Trisch

und Kaiser Klemens kann nicht mehr schlafen. Seine Kleider verfolgen ihn bereits nachts im Traum. Dabei warten Schneiderin Elsa und Weber Walter verzweifelt auf ihr Geld. Die Not macht erfinderisch!


Yeovox





# VEO VOX – Ihre Vorteile auf einen Blick

- hochqualitative Vorlesefunktion mit natürlichen Stimmen, individuell regulierbare Lesegeschwindigkeit und -lautstärke
- intelligente Sprachausgabefunktion mit 2 Modi:
  - **Live-Lese-Modus** mit automatischer Bewegungserkennung für kontinuierliches Vorlesen ohne Unterbrechung
  - **Standbild-Lese-Modus** zum Antippen und Vorlesen der gewünschten Textpassagen, z.B. Spalte
- automatische Erkennung des Textaufbaus (Bild, Text, Format) für jederzeit opt. Übersicht
- einfache, intuitive Bedienung am Touchscreen der 24"-Klasse über große, übersichtliche Bediensymbole plus alle Vorteile des Bildschirmlesesystems VEO

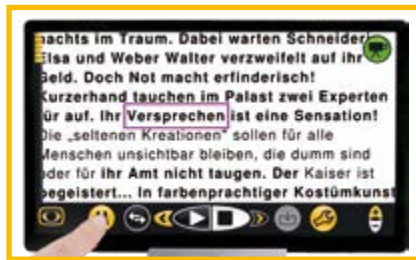

intuitiv



übersichtlich



live



hochauflösender Touchscreen der 24"-Klasse (ca. 61 cm)  
stufenlos höhenverstellbar, neigbar, drehbar, um 90° rotierbar



Vergrößerung ca. 1 - 100fach



Vario Kamera:  
Full HD+ Kamera mit optischem Zoom



Echtfarben  
Fehlfarben:



individuelle Fehlfarb-Kombinationen



diverse Darstellungsformen:  
Original, Overlay, Spalte, horizontal, vertikal, Wort



Textauswahl: ganzer Bildinhalt, ganze Seite, Spalte oder ab einem bestimmten Wort



automatische Spracherkennung (satzweise)  
über 30 Sprachen mit über 100 Stimmen inklusive



Navigation: absatz-, satz-, wort-, buchstabenweise



eingebauter Lautsprecher, Anschluss von Bluetooth-Kopfhörern/-Lautsprechern über Adapter möglich (nicht im Lieferumfang)



Lieferumfang:  
VEOVOX mit Touchscreen, 3-Knopf-Bedienung, Netzteil mit Kabel, Gebrauchsanweisung



Gewicht ca. 17 kg  
Maße (B x H x T)  
ca. 55 x 53 x 59 cm



Zubehör (optional):  
15-Tasten-Bedieneinheit, höhenverstellbares Untergestell

## Unsere deutschlandweiten Niederlassungen und Fachgeschäfte:

### Reinecker Vision Hamburg

Am Güterbahnhof 8a  
21035 Hamburg-Bergedorf  
Tel. 040 72378484-0  
Fax 06257 9311-8833  
info.hamburg@reineckervision.de

### Reinecker Vision Berlin

Brückenstraße 5-6 a  
10179 Berlin  
Tel. 030 8904978-0  
Fax 06257 9311-8333  
info.berlin@reineckervision.de

### Reinecker Vision Gera

Gottlieb-Daimler-Straße 28  
07552 Gera-Bieblach  
Tel. 0365 430588-0  
Fax 06257 9311-8533  
info.gera@reineckervision.de

### Reinecker Vision Köln

Aachener Straße 1347-1349  
50859 Köln  
Tel. 02234 4076-0  
Fax 06257 9311-8633  
info.koeln@reineckervision.de

### Reinecker Vision Alsbach (bei Darmstadt)

Erlenweg 5  
64665 Alsbach-Hähnlein  
Tel. 06257 9311-8400  
Fax 06257 9311-8433  
info.alsbach@reineckervision.de

### Reinecker Vision München

Friedenheimer Straße 75  
80686 München  
Tel. 089 4567848-0  
Fax 06257 9311-8733  
info.muenchen@reineckervision.de

Reinecker Vision GmbH  
Zentrale

Sandwiesenstraße 19  
64665 Alsbach-Hähnlein

**Tel. 06257 9311-0**

Fax 06257 9311-8008

info@reineckervision.de  
www.reineckervision.de

Online einkaufen unter  
[www.lowvision-shop.de](http://www.lowvision-shop.de)

Wir sind bundesweit für Sie da

